

# CHARGEUR CENTRA™ e2e Active

Guide d'utilisation

**SIEMENS**

Félicitations ! Nous vous remercions d'avoir choisi Siemens, l'efficacité et la performance des aides auditives du 1<sup>er</sup> fabricant mondial.


Votre chargeur CENTRA Active vous permettra de profiter de vos aides auditives CENTRA Active en toute liberté.

Après cinq heures de charge, vos aides auditives auront une autonomie d'une journée complète. Vous n'aurez plus à vous soucier du remplacement des piles.

Ce manuel, en complément des conseils de votre audioprothésiste, vous aidera à comprendre le fonctionnement de votre chargeur CENTRA Active.




Pour toute information complémentaire relative à votre chargeur CENTRA Active, votre audioprothésiste se tient à votre disposition.

3	Votre chargeur CENTRA Active	4
4	Comment fonctionne votre chargeur CENTRA™ Active ?	5

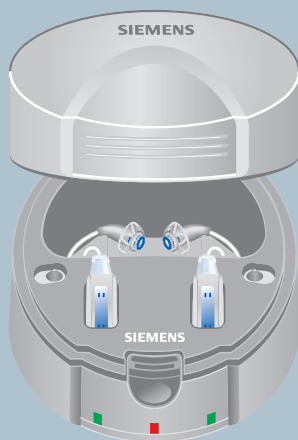


# 3

## Votre chargeur CENTRA Active

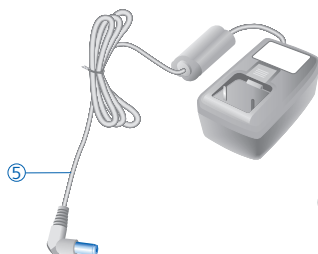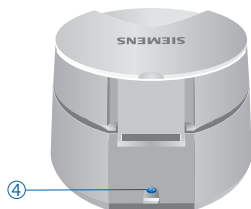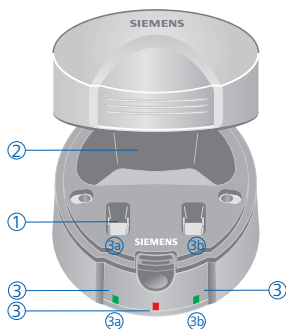

### Description :

- ① Contacteurs de charge
- ② Cavité pour partie(s) écouteur(s) avec dôme(s)
- ③ Témoins lumineux indiquant le statut du chargeur. Chaque LED correspond à une fente (droite/gauche)
- ④ Branchement alimentation
- ⑤ Prise secteur avec adaptateur aux normes du pays de commercialisation

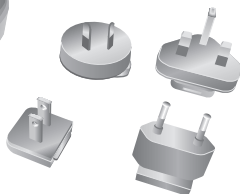


N'utilisez que les accumulateurs fournis avec votre chargeur CENTRA™ e2e Active. La durée de vie d'un accumulateur est d'une année, variable en fonction de l'utilisation et de la conservation.

Chargez complètement les accumulateurs avant la première utilisation.

### **IMPORTANT :**

Ne tentez surtout pas de charger des piles standard non rechargeables !

Le chargeur CENTRA™ e2e Active est simple à utiliser. Vous pouvez mettre, en même temps, deux aides auditives avec écouteur et dôme dans le chargeur. La charge dure environ 5 heures. Le chargeur s'éteint automatiquement dès que la charge est terminée. Votre CENTRA™ e2e Active est prêt à fonctionner pendant une journée entière (en moyenne, selon l'utilisation). Les différents statuts de charge sont indiqués par trois diodes lumineuses.

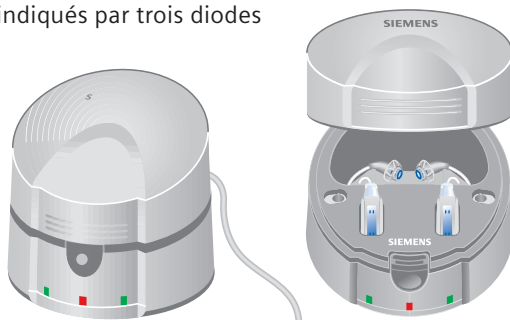

### Comment fonctionne votre chargeur CENTRA™ Active ?

- Branchez le chargeur sur le secteur. La diode orange, au centre, indique que le chargeur est sous tension. Ouvrez le chargeur en appuyant sur le bouton noir. Le couvercle s'ouvre.
- Le chargeur se compose de trois parties : Deux zones de chargement pour les aides auditives et une cavité plus grande pour la partie écouteur avec le dôme.
- Une fois les aides auditives placées dans le chargeur et le couvercle refermé, les aides auditives s'éteignent et la charge commence automatiquement.
- Quand la charge est terminée, la diode verte reste allumée de façon continue.

Les diodes lumineuses indiquent le statut de charge comme suit :

LED	Etat	Fonction	Conséquence
LED du milieu	<b>orange</b>	Chargeur sous tension	Le chargeur est prêt à fonctionner
LED de droite ou de gauche	<b>vert clignotant</b>	Charge en cours	Laissez les aides auditives dans le chargeur
LED de droite ou de gauche	<b>vert constant</b>	Charge terminée	Enlevez les aides du chargeur
LED de droite ou de gauche	<b>rouge</b>	Si la charge ne peut commencer, parce que les piles ne sont pas rechargeables, qu'elles sont endommagées ou que les polarités sont inversées, le chargeur s'éteint automatiquement.	Débranchez l'appareil. Mettez des piles rechargeables et en bon état. Puis rebranchez le chargeur.

# 4

## Votre chargeur CENTRA Active

Remplacez les piles ou rechargez les accumulateurs dans les cas suivants :

- Le volume de l'aide auditive devient plus faible
- Vous entendez les bips de fin de pile
- Votre télécommande ePocket vous indique que les piles sont faibles

### **Attention !**

Tenez les piles et les aides auditives hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement le médecin.

### **IMPORTANT :**

Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle.


Remettez-les à votre audioprothésiste qui prendra les dispositions écologiques nécessaires.

N'exposez jamais votre chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité. Ne le laissez pas en contact direct avec les rayons solaires.

Pendant la charge, la température doit se situer entre 15°C et 35°C (59°F et 95°F).





Avec le logo CE, Siemens confirme être conforme aux directives Européennes 93/42/EEC sur les appareils médicaux. Au sein de l'Union Européenne, les produits marqués du symbole  font l'objet d'une collecte spécifique conformément au décret n° 2005-829 du 22 juillet 2005 relatif à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Nous recommandons de vous mettre en contact avec le service après vente pour suivre ces directives et exclure tous dommages environnementaux possibles en résultant

CE  
CE 0123



Siemens Audiologische Technik  
Gebbertstr. 125  
91050 Erlangen

[www.siemens.com/hearing](http://www.siemens.com/hearing)