

BB100

Téléphone à larges touches
Correcteur d'émission et de réception

Notice d'utilisation



DESRIPTIF

Activation automatique de la correction d'écoute au décroché

3 mémoires d'urgence

Réglage de la tonalité de réception


Ergot à retourner pour maintenir le téléphone en position murale


Réglage du volume de réception

Connecteur du cordon combiné


Rappel du dernier numéro composé

Mise en mémoire

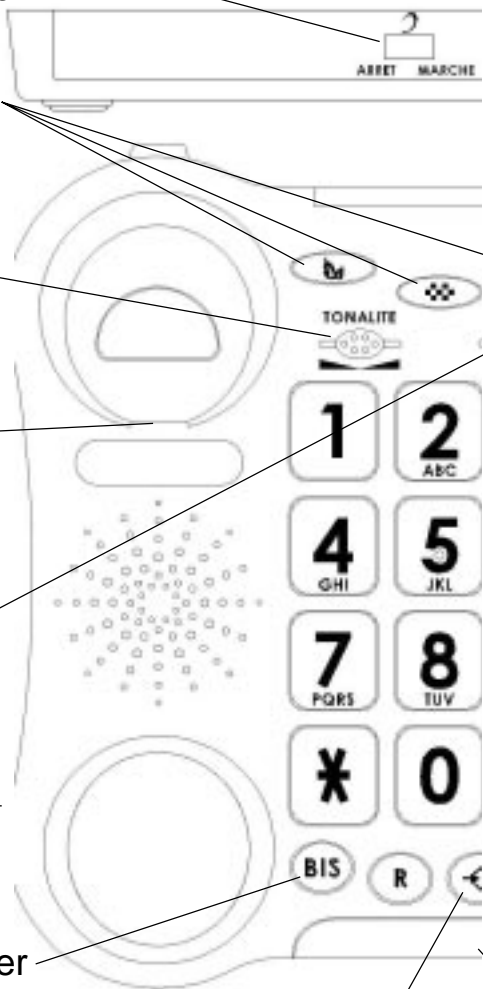

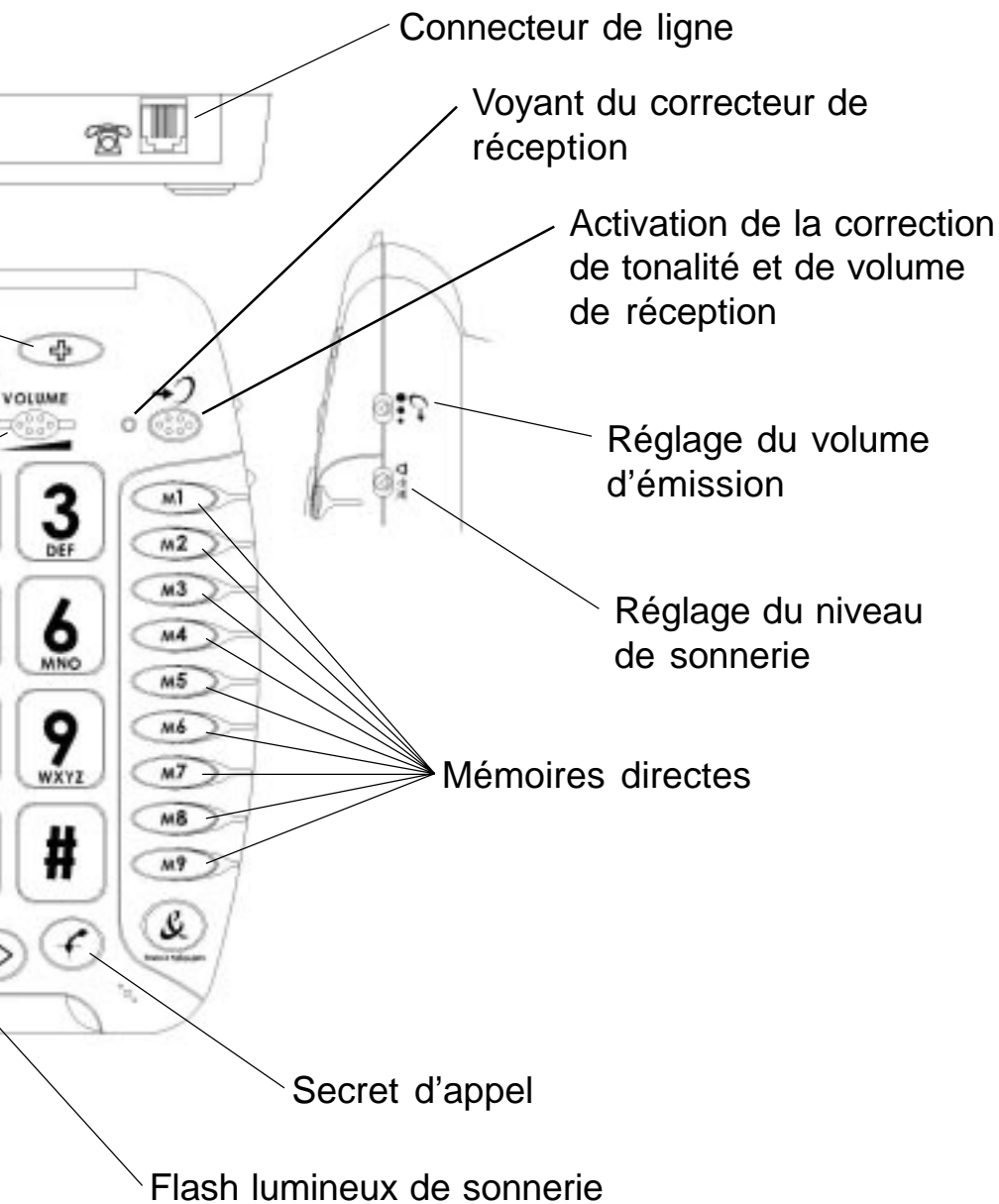

INSTALLATION

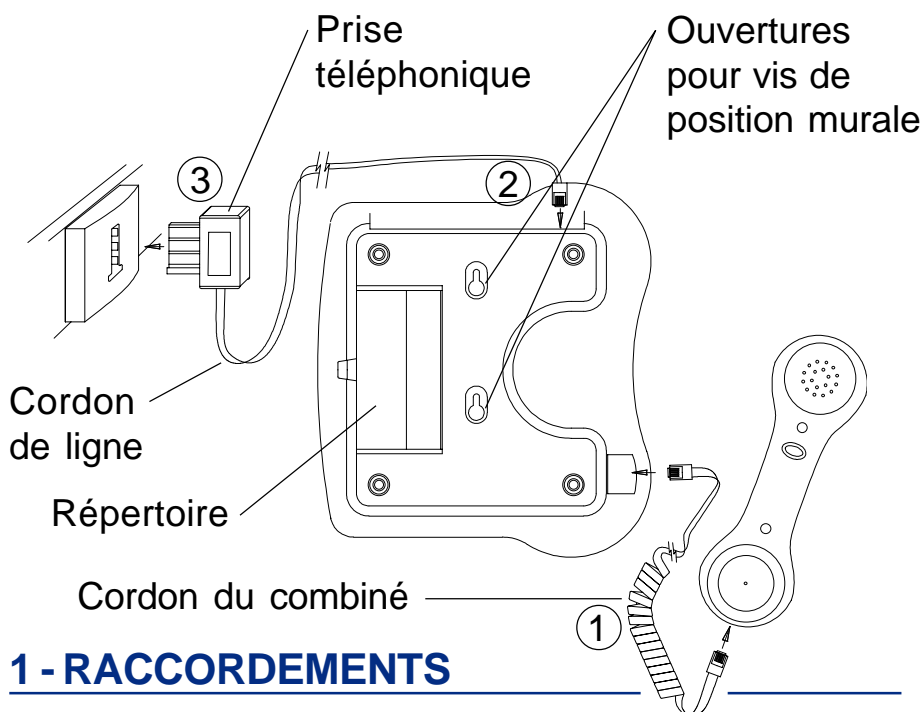

1 - RACCORDEMENTS

- 1 - Branchez le cordon du combiné.
- 2 - Branchez le cordon de ligne.
- 3 - Branchez le joncteur téléphonique dans votre prise téléphonique murale.

2 - SONNERIE

Un commutateur situé sur le côté de l'appareil permet de régler la sonnerie:


 : désactivée,  : faible,  : forte

INSTALLATION

Si la mélodie de sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez un nouveau réglage parmi les 9 proposés ci-dessous:

	Faible	Moyen	Fort
Mélodie 1	1	2	3
Mélodie 2	4	5	6 (par défaut)
Mélodie 3	7	8	9

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour changer le réglage :

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche #.
- Appuyez sur un chiffre de 1 à 9.

Le réglage sera effectif au prochain appel.

3 - POSITION MURALE

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base (voir descriptif page précédente) le tourner et le réinsérer.

Percez 2 trous verticaux distant de 80 mm dans votre mur pour y insérer 2 chevilles avec leurs vis.

Laissez dépasser les vis de quelques millimètres.

Faites glisser ensuite votre téléphone dans les têtes de vis.

UTILISATION

1 - RECEVOIR UN APPEL

- Lorsque le téléphone sonne (flash lumineux de sonnerie de votre téléphone activé), décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.



2 - REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION

Vous pouvez amplifier le volume et la tonalité de réception de votre combiné.


La touche →) permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation. Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du correcteur de réception situé à côté de la touche →) est allumé.


Les touches, **TONALITE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité et le volume de réception.

UTILISATION

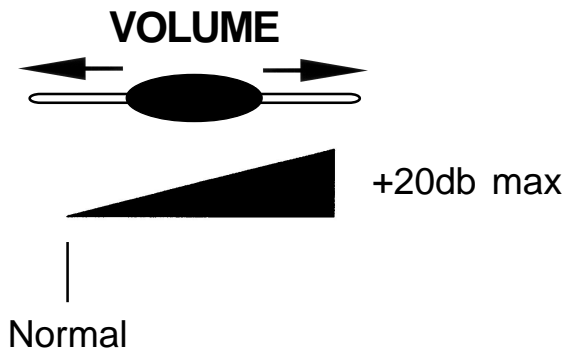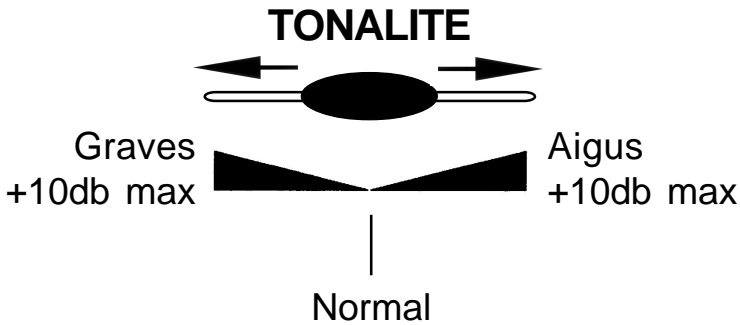

Nota :

L'interrupteur  sur **MARCHE** situé à l'arrière de l'appareil active automatiquement la correction à chaque décroché de votre combiné.

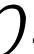Sur **ARRET**, il faudra activer la fonction en appuyant sur la touche .


UTILISATION

3 - APPELER

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

4 - REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

Si votre correspondant vous entend faiblement, vous pouvez augmenter le volume d'émission à l'aide du commutateur situé sur le côté de l'appareil. Vous pouvez aussi choisir de diminuer le volume d'émission.

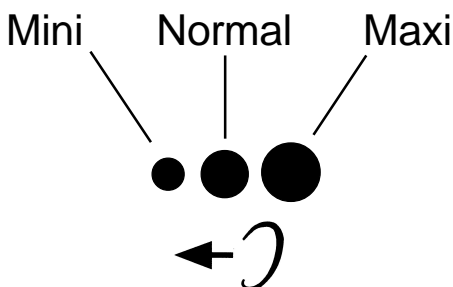

UTILISATION

5 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO


- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche **BIS**, le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les n° en mémoire).

6 - TOUCHE «R»

Touche d'accès aux Services de France Télécom (Signal d'Appel[®], Conversation à Trois[®]).

7 - FONCTION SECRET

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.

- Appuyez et maintenez enfoncé la touche . Votre correspondant ne vous entend plus.
- Relâchez la touche pour rétablir la conversation.

UTILISATION

8 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE



Votre téléphone possède 12 mémoires directes dont 3 d'urgences, (21 chiffres maximum par mémoire).

Les 3 mémoires d'urgences permettent de mémoriser par exemple les 3 numéros suivants:

- POMPIER : 18
- POLICE : 17
- VOTRE MEDECIN

*Pensez à enregistrer
ces numéros
lors de l'installation*

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour mémoriser vos numéros:

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ..., ou **M9** ou sur une des trois touches d'urgence pour enregistrer votre numéro.
- Composez le numéro à mémoriser.
- Appuyez à nouveau sur la touche .

Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface la précédente.

UTILISATION

9 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné.
 - Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ..., ou **M9** ou sur une des trois touches d'urgence, le numéro en mémoire se recompose automatiquement.
- Pour repérer vos numéros enregistrés, utilisez le répertoire situé en dessous de la base.
- Aidez vous du tableau ci-dessous pour le préparer:

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

Exemple :

Pierre	1	01 64 57 ...
--------	---	--------------

SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM

L'aide aux utilisateurs de produits
et services de France Télécom

 **N° Indigo** **0 825 33 11 22**

0,15 EuroTTC / MN

de 8 h à 20 h du lundi au samedi*

* hors jours fériés

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE.

Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38).

Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

